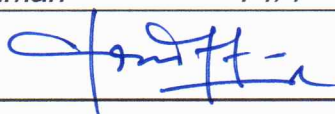


	PEMERIKSAAN ASAM URAT MENGGUNAKAN STIK		
	SOP	No. Dokumen : 65 /SOP/LAB/PUSBUII	
		No. Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 03 Januari 2023	
	Halaman : 1/4		
PUSKESMAS BONTANG UTARA II			dr. DwiYanti NIP. 19830222 201402 2 003
1. Pengertian	Pemeriksaan asam urat yang dilakukan menggunakan alat test asam urat digital yang dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang cepat.		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan asam urat dengan metode cepat di Puskesmas Bontang Utara II.		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas tentang Pelayanan Laboratorium Puskesmas Bontang Utara II.		
4. Referensi	Departemen Kesehatan RI, Pedoman Praktek Laboratorium yang Benar (Good Laboratory Practice), Jakarta, 2008.		
5. Prosedur/Langkah-langkah	1. Persiapan Alat dan bahan : a. Sampel darah; b. Alat tes asam urat digital; c. Kapas alkohol; d. Kapas steril; e. Blood Lancet; f. Autoklik; g. Strip asam urat. 2. Petugas yang melaksanakan : a. Analis laboratorium; b. Paramedis. 3. Prosedur / langkah-langkah : a. Petugas memasang strip asam urat pada alat tes asam urat digital; b. Petugas mengambil darah kapiler sesuai SOP yang berlaku; c. Petugas memasukkan darah ke dalam strip; d. Petugas menunggu hingga hasil muncul pada alat; e. Petugas mencatat hasil pada lembar hasil pemeriksaan ; f. Petugas melakukan verifikasi;		

	g. Admin memasukkan data pasien dan hasil pemeriksaan di spreadsheet laboratorium ;
6. Diagram Alir :	<pre> graph TD A([Pasang strip asam urat pada alat digital]) --> B[Mengambil darah kapiler] B --> C[Masukkan darah ke dalam strip] C --> D[Tunggu hingga hasil muncul pada alat] D --> E([Catat hasil di lembar hasil dan buku register]) </pre>
7. Hal Yang Perlu Diperhatikan	Waktu tunggu hingga hasil keluar tergantung merk alat (20-60 detik).
8. Unit Terkait	1. Ruang Laboratorium; 2. Program Pelayanan Laboratorium Luar Gedung.
9. Dokumen Terkait	1. Form Permintaan Pemeriksaan Laboratorium 2. Spreadsheet Laboratorium 3. Form Hasil Pemeriksaan Kimia Darah
10. Rekaman historis perubahan	Terlampir

REKAMAN HISTORI PERUBAHAN :

No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tgl diberlakukan perubahan
1	Judul : Pemeriksaan asam urat metode stick	Judul : Pemeriksaan asam urat menggunakan stik	3 Januari 2023
2	Prosedur/langkah-langkah : 1. Petugas menyiapkan alat dan bahan 2. Petugas memasang strip asam urat pada alat tes asam urat digital 3. Petugas mengambil darah kapiler/darah vena sesuai SOP yang berlaku 4. Petugas memasukkan darah ke dalam strip 5. Petugas menunggu hingga hasil muncul pada alat 6. Petugas mecatat hasil di lembar hasil dan buku register	Prosedur/langkah-langkah : a. Petugas memasang strip asam urat pada alat tes asam urat digital; b. Petugas mengambil darah kapiler sesuai SOP yang berlaku; c. Petugas memasukkan darah ke dalam strip; d. Petugas menunggu hingga hasil muncul pada alat; e. Petugas mencatat hasil pada lembar hasil pemeriksaan ; f. Petugas melakukan verifikasi; g. Admin memasukkan data pasien dan hasil pemeriksaan di spreadsheet laboratorium ;	3 Januari 2023
3	Diagram alir :	Diagram alir : Diagram alir mengikuti perubahan pada langkah kerja	3 Januari 2023
4	Unit Terkait : Laboratorium	Unit Terkait : 1. Ruang Laboratorium 2. Program Pelayan Laboratorium Luar Gedung	3 Januari 2023
5	Dokumen Terkait : 1. Buku Register Laboraorium	Dokumen Terkait :	3 Januari 2023

	2. Form Permintaan Pemeriksaan Laboratorium 3. Form Hasil Pemeriksaan Kimia Darah	1. Form Permintaan Pemeriksaan Laboratorium 2. Spreadsheet Laboratorium 3. Form Hasil Pemeriksaan Kimia Darah	
--	--	---	--